

Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji gogli i kontrolerów VR TierOne

Zredukowanie liczby drobnoustrojów poprzez dezynfekcję urządzenia VR jest konieczne dla zachowania zdrowia użytkowników. Czyść i dezynfekuj gogle i kontrolery pomiędzy użyciami.



Przygotuj: zapas czystych i suchych ściereczek z mikrofibry, preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni o szerokim spektrum biobójczym (dozwolone składniki na bazie alkoholu) lub 70-75% roztwór alkoholowy, nawilżane chusteczki do dezynfekcji, czystą wodę i ręcznik papierowy.

- 1 Umyj ręce przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia.
- 2 Do czyszczenia nie stosuj pyłących i szorstkich materiałów.
- 3 Widoczne zabrudzenia usuń za pomocą ściereczki zwilżonej wodą.
- 4 Nie rozpylaj środka dezynfekcyjnego bezpośrednio na urządzenie.
- 5 Do dezynfekcji użyj ściereczki zwilżonej preparatem dezynfekcyjnym.
- 6 Do dezynfekcji możesz użyć gotowych chusteczek dezynfekujących.
- 7 Zdezynfekuj twarde powierzchnie urządzeń dotykane najczęściej.
- 8 Nie stosuj środków dezynfekcyjnych do elementów wykonanych z gąbki.
- 9 Soczewki gogli VR czyść z odpowiednią ostrożnością, aby uniknąć zarysowań.
- 10 Soczewki wycieraj suchą ściereczką ruchem okrężnym od środka na zewnątrz.
- 11 Zastosuj gruszkę do czyszczenia optyki, aby zdmuchać kurz i pył z soczewek.
- 12 Nie stosuj środka dezynfekcyjnego z alkoholem do czyszczenia soczewek.
- 13 Podczas czyszczenia unikaj dotykania soczewek palcami, aby nie zatłuszczyć optyki.
- 14 Nauszniki słuchawek zestawu VR oczyść ściereczką z mikrofibry zwilżoną wodą.
- 15 Wewnętrzną nakładkę z gąbki zdemontuj, oczyść wodą, osusz i zamontuj w goglach.
- 16 Nie susz w suszarce bębnowej wymiennych nakładek ze skóry poliuretanowej.
- 17 Nakładkę wewnętrzną wykonaną ze skóry PU zdezynfekuj i osusz ręcznikiem papierowym.
- 18 Zdezynfekowane gogle i kontrolery pozostaw do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
- 19 Przed ponownym użyciem rozważ stosowanie jednorazowych masek pod gogle VR.

