

Anweisung zum Reinigen und Desinfizieren von Brillen und Controllern VR TierOne

Die Reduzierung der Mikrobenanzahl durch eine Desinfektion des VR-Geräts ist notwendig, um die Gesundheit der Benutzer zu erhalten. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Brille und die Controller zwischen den Anwendungen.



Bereiten Sie vor: einen Vorrat an sauberen und trockenen Mikrofasertüchern, ein Breitband-Desinfektionsmittel für die schnelle Desinfektion kleiner Oberflächen (Zutaten auf Alkoholbasis erlaubt) oder eine 70-75%ige Alkohollösung, feuchte Desinfektionstücher, sauberes Wasser und ein Papierhandtuch.

- 1 Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie das Gerät reinigen.
- 2 Verwenden Sie zur Reinigung keine staubenden oder scheuernden Materialien.
- 3 Sichtbaren Schmutz mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch entfernen.
- 4 Sprühen Sie kein Desinfektionsmittel direkt auf das Gerät.
- 5 Verwenden Sie zur Desinfektion ein mit Desinfektionsmittel befeuchtetes Tuch.
- 6 Zur Desinfektion können Sie auch gebrauchsfertige Desinfektionstücher benutzen.
- 7 Desinfizieren Sie die harten Oberflächen der Geräte, die am häufigsten berührt werden.
- 8 Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel auf aus Schwamm gefertigten Bauteilen.
- 9 Reinigen Sie die Linsen der VR-Brille vorsichtig, um Kratzer zu vermeiden.
- 10 Wischen Sie die Linsen mit einem trockenen Tuch in kreisenden Bewegungen von der Mitte nach außen hin ab.
- 11 Verwenden Sie einen Optik-Blasebalg, um Schmutz und Staub von den Linsen zu entfernen.
- 12 Verwenden Sie zur Reinigung der Linsen kein Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.
- 13 Vermeiden Sie beim Reinigen das Berühren der Linsen mit den Fingern, um ein Befetten der optischen Bauteile zu vermeiden.
- 14 Reinigen Sie die Ohrmuscheln der VR-Brille mit einem mit Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch.
- 15 Nehmen Sie den inneren Aufsatz aus Schwamm heraus, reinigen Sie ihn mit Wasser, trocknen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder in die Brille ein.
- 16 Trocknen Sie die abnehmbaren Aufsätze aus PU-Leder nicht in einem Trockner.
- 17 Desinfizieren Sie den inneren Aufsatz aus PU-Leder und trocknen Sie ihn mit einem Papierhandtuch.
- 18 Lassen Sie die desinfizierten Brillen und Controller bei Raumtemperatur trocknen.
- 19 Erwägen Sie vor dem erneuten Einsatz die Verwendung von Einwegmasken für VR-Brillen.

